



gli **ARTIGIANI**
del **RIPOSO**



COPPER CARE

Materasso antidecubito



Istruzioni per l'uso e la manutenzione

Istruzioni originali

Data	Revisione	Motivo della revisione
22/08/2022	0.0	Prima Edizione

Sommario

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE.....	4
DESTINAZIONE D'USO	5
CARATTERISTICHE TECNICHE	5
DESCRIZIONE GENERALE.....	6
SIMBOLOGIA UTILIZZATA.....	7
ETICHETTA IDENTIFICATIVA	7
PIATTAFORMA DI SOSTEGNO.....	8
UTILIZZO.....	8
RIMOZIONE DI MACCHIE.....	8
MANUTENZIONE.....	8
VITA PREVISTA	9
SMALTIMENTO	9
GARANZIA.....	9

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Il fabbricante:

Gli Artigiani del Riposo srl, con sede in C/da Scalapitta snc, 87073 Oriolo (CS)

SRN: n.d.

Dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che il seguente materasso antidecubito

Nome prodotto	Codice prodotto	ID BD/RDM	UDI-DI di base
COPPER CARE	02029	2298574	80507138502029ME

Destinazione d'uso: il materasso è destinato ad essere utilizzato per la prevenzione statica di lesioni da decubito, e può essere impiegato in condizioni di cute integra o in presenza di lesioni di 1° - 2° stadio (per soggetti di peso inferiore o uguale a 100 kg e a seguito di un giudizio clinico).

Ambiente d'uso: uso domestico.

Il dispositivo non può essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Personale destinato all'uso del dispositivo: soggetti invalidi e affetti da condizioni gravi che obbligano alla degenza.

Classe di rischio: Classe I (conformemente alla Regola 1, Allegato VIII del Regolamento (UE) 2017/745)

È conforme ai seguenti atti legislativi dell'Unione:

2017/745/UE - Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici.

Il dispositivo è assoggettato alla procedura di valutazione di conformità prevista all'articolo 52, punto 7 del Regolamento 2017/745/UE

Oriolo, 22 agosto 2022

Amministratore unico: Vincenzo Brancaccio

DESTINAZIONE D'USO

Il materasso COPPER CARE è destinato ad essere utilizzato per la prevenzione statica di lesioni da decubito, e può essere impiegato in condizioni di cute integra o in presenza di lesioni di 1° - 2° stadio (per soggetti di peso inferiore o uguale a 100 kg e a seguito di un giudizio clinico).

Ambiente d'uso: uso domestico.

Il dispositivo non può essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Personale destinato all'uso del dispositivo: soggetti invalidi e affetti da condizioni gravi che obbligano alla degenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Lunghezza</i>	190 - 195 - 200 cm
<i>Larghezza</i>	80 - 85 - 90 - 120 - 140 - 160 - 165 - 170 - 180 cm
<i>Altezza della lastra interna</i>	20,5 cm
<i>Composizione struttura interna</i>	1° Strato: Memory giallo WL 50 VE - 7,5 cm 2° Strato: Poliuretano aragosta 30 SS - 8 cm 3° Strato: Water Foam rosso SIP 35 S - 5 cm
<i>Lastra portante</i>	Poliuretano
<i>Rivestimento</i>	<i>Tessuto superiore:</i> 100% PES <i>Imbottitura:</i> 100% PES <i>Tessuto inferiore:</i> 100% Maglina di poliestere <i>Fascia perimetrale:</i> Tessuto superiore 100% PES - Tessuto 3D Pes 100% - Imbottitura 100% Pes - Tessuto inferiore: TNT
<i>Peso massimo paziente</i>	Portata materasso: 120 kg Le prestazioni antidecubito sono garantite per utilizzatori di peso inferiore o uguale ai 100 kg

DESCRIZIONE GENERALE

Strato A: Memory giallo 7,5 cm;

Strato B: Poliuretano aragosta 8 cm;


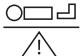














Strato C: Water Foam rosso SIP 5 cm.

Rivestimento in tessuto jaquard, di alta grammatura; fascia perimetrale in tessuto, con maniglie cucite; nel bordo perimetrale viene applicata una fascia in 3D per migliorare l'areazione interna del materasso; antibatterico. Rivestimento sfoderabile, lavabile in lavatrice.

Altezza finita del materasso: 24 cm.



SIMBOLOGIA UTILIZZATA

 REF Codice catalogo	 Massimo peso paziente	 Asciugare appeso
 LOT Lotto di produzione	 UDI Vettore UDI	 Non candeggiare
 F Fabbricante	 SN Numero di serie	 Non stirare
 IT Data di produzione	 Non asciugare in tamburo	 P Lavabile a secco (eccetto tetracloroetilene)
 MD Dispositivo medico	 Lavare a 30° molto delicato, ammollo o lavatrice	
 Marcatura CE ai sensi del Regolamento 2017/745/UE	 Non centrifugare	

ETICHETTA IDENTIFICATIVA

Di seguito viene riportata l'etichetta identificativa cucita sul materasso.

 gli ARTIGIANI del RIPOSO		 Gli Artigiani del Riposo S.r.l. con sede in C/da Scalapitta snc,87073 Oriolo (CS) tel +39 0981 931051 - info@gliartigianidelriposo.it			
 REF XXXXXXXX	 LOT XXXXXXXX	MODELLO		LATO A	
 MM/20XX	 = XXX Kg	000 x 000 cm			
 SN XXXXX	MADE IN ITALY		LAVAGGIO		 Vettore UDI
			Simboli di lavaggio ISO 3758		

PIATTAFORMA DI SOSTEGNO

! *ATTENZIONE! Non usare reti con piano letto a maglia metallica.*

La piattaforma di sostegno del materasso dovrà essere a doghe in legno e in grado di sostenere il peso dell'utilizzatore e del materasso. Il piano di appoggio dovrà essere libero da ingombri e assicurare una adeguata ventilazione.

UTILIZZO

! *AVVERTENZA! L'utilizzo da parte di persone di peso superiore ai 100 kg modifica le prestazioni antidecubito riportate nel presente testo.*

! *AVVERTENZA! Evitare una postura fissa.*

! *AVVERTENZA! L'utilizzo del materasso in condizioni di lesioni alla cute di 1° - 2° stadio deve essere eseguito a seguito di giudizio clinico ed eseguito sotto controllo medico.*

Per effettuare la messa in uso del materasso procedere nel modo seguente:

- estrarre il materasso dalla confezione e arieggiarlo per alcune ore;
- verificare che il piano di appoggio sia pulito, asciutto e libero da corpi estranei che possano nuocere alla integrità del materasso;
- controllare che la cerniera del rivestimento sia completamente chiusa;
- posizionare il materasso direttamente sul piano rete con il lato "A" rivolto verso l'alto.

RIMOZIONE DI MACCHIE

Per pulire eventuali macchie non usare solventi o altri materiali aggressivi, ma esclusivamente acqua tiepida asciugando bene la zona a bassa temperatura subito dopo il lavaggio.

MANUTENZIONE

Per prolungare la vita del materasso ed evitare deformazioni permanenti è necessario eseguire una rotazione testa/piedi ad ogni cambio lenzuola e far arieggiare la lastra qualche ora aprendo la cerniera. Non esporre a fonti di calore dirette o a umidità. Non lavare la lastra interna.

VITA PREVISTA

Le prestazioni antidecubito sussistono per circa 6/7 anni per un utilizzo normale. Il fabbricante non assicura queste prestazioni con un uso intensivo del materasso.

SMALTIMENTO

Il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti urbani. Per lo smaltimento rivolgersi al proprio comune, ad un'azienda specializzata o alle oasi ecologiche.

GARANZIA

I materassi Gli Artigiani Del Riposo sono coperti da garanzia Europea della durata di 24 mesi.

Note:



Gli artigiani del riposo

C/da Scalapitta snc

- zona PIP

87073 - Oriolo (CS)

tel +39 0981 931051

info@gliartigianidelriposo.it