



gli **ARTIGIANI**
del **RIPOSO**



**Craft traditional
memory**

Materasso antidecubito



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Il fabbricante:

Gli Artigiani del Riposo srl, con sede in C/da Scalapitta snc, 87073 Oriolo (CS)

SRN: n.d.

Dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che il seguente materasso antidecubito

| Nome prodotto | Codice prodotto | ID BD/RDM |
|--------------------------|-----------------|-----------|
| Craft traditional memory | 04194 | 2513759 |

Destinazione d'uso: il materasso è destinato ad essere utilizzato per la prevenzione statica di lesioni da decubito, e può essere impiegato in condizioni di cute integra o in presenza di lesioni di 1° - 2° stadio (per soggetti di peso inferiore o uguale a 100 kg e a seguito di un giudizio clinico).

Ambiente d'uso: uso domestico.

Il dispositivo non può essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Personale destinato all'uso del dispositivo: soggetti invalidi e affetti da condizioni gravi che obbligano alla degenza.

Classe di rischio: Classe I (conformemente alla Regola 1, Allegato VIII del Regolamento (UE) 2017/745)

È conforme ai seguenti atti legislativi dell'Unione:

2017/745/UE - Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici.

Il dispositivo è assoggettato alla procedura di valutazione di conformità prevista all'articolo 52, punto 7 del Regolamento 2017/745/UE

Oriolo, dicembre 2023

Amministratore unico: Vincenzo Brancaccio

DESTINAZIONE D'USO

Il materasso SENSOR MEMORY è destinato ad essere utilizzato per la prevenzione statica di lesioni da decubito, e può essere impiegato in condizioni di cute integra o in presenza di lesioni di 1° - 2° stadio (per soggetti di peso inferiore o uguale a 100 kg e a seguito di un giudizio clinico).

Ambiente d'uso: uso domestico.

Il dispositivo non può essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Personale destinato all'uso del dispositivo: soggetti invalidi e affetti da condizioni gravi che obbligano alla degenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------------------|---|
| <i>Lunghezza</i> | 190 - 195 - 200 cm |
| <i>Larghezza</i> | 80 - 85 - 90 - 120 - 140 - 160 - 165 - 170 - 180 cm |
| <i>Altezza della lastra interna</i> | 30 cm circa |
| <i>Composizione struttura interna</i> | 1° Strato: Memory verde 6 cm 2° 4° e Strato: poliuretano 2,5 cm 3° Strato: poliuretano perimetrale a protezione delle molle insacchettate h 14 cm 5° Strato: WaterFoam 6 cm |
| <i>Lastra portante</i> | Molle insacchettate |
| <i>Rivestimento</i> | <i>Tessuto superiore:</i> 100% vi <i>Imbottitura:</i> 100% PES <i>Tessuto inferiore:</i> 100% Maglina di poliestere <i>Fascia perimetrale:</i> Tessuto superiore 95% Microfibra di poliestere - 5% Polipropilene - Tessuto 3D 100% Pes Imbottitura 100% Pes - Tessuto inferiore: maglina polipropilene |

Peso massimo paziente

Portata materasso: 140 kg

Le **prestazioni antidecubito** sono garantite per utilizzatori di peso inferiore o uguale ai 100 kg

DESCRIZIONE GENERALE

Strato A: memory bugnato micromassaggiante a 5 zone di portanza differenziata di 6 cm ad alta densità;


Strato B: tessuto poliuretano a protezione delle molle spessore 2,5; 800 molle

Strato C: poliuretano perimetrale a protezione delle molle insacchettate;




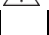


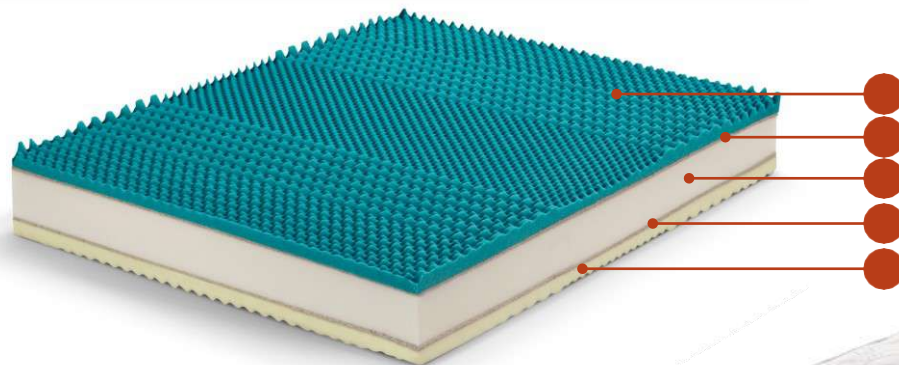



Strato D: WaterFoam bugnato micromassaggiante da 6 cm ad alta densità, a cellule aperte.

Rivestimento in tessuto jaquard viscosa, di alta grammatura; fascia perimetrale in tessuto, con maniglie cucite; anallergico, antiacaro, antibatterico. Rivestimento sfoderabile, lavabile in lavatrice.

Altezza finita del materasso: 30 cm circa.



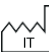






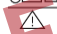



SIMBOLOGIA UTILIZZATA

| | | | | | |
|--|---|---|--------------------------|----------|--|
|  REF | Codice catalogo |  | Massimo peso paziente | H | Non candeggiare |
|  LOT | Lotto di produzione |  | Vettore UDI | L | Lavabile a secco (eccetto tetracloroetilene) (solo fodera) |
|  | Fabbricante |  | Numero di serie | m | Lavare a 30° molto delicato, ammollo o lavatrice |
|  | Data di produzione | U | Non asciugare in tamburo | 6 | Asciugare appeso |
|  MD | Dispositivo medico |  | Non centrifugare | | |
|  | Marcatura CE ai sensi del Regolamento 2017/745/UE | C | Non stirare | | |

ETICHETTA IDENTIFICATIVA

Di seguito viene riportata l'etichetta identificativa cucita sul materasso.

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
|  |  | Gli Artigiani del Riposo S.r.l. con sede in C/da Scalapitta snc, 87073 Oriolo (CS) tel +39 0981 931051 - info@gliartigianidelriposo.it |  MD |  | |
|  REF | XXXXXXX |  LOT | XXXXXXX | MODELLO | LATO |
|  | MM/20XX |  | = XXX Kg | 000 x 000 cm | |
|  SN | XXXXXX |  | MADE IN ITALY | LAVAGGIO | |
| | | | | Simboli di lavaggio ISO 3758 |  UDI Vettore UDI |

PIATTAFORMA DI SOSTEGNO

⚠ ATTENZIONE! *Non usare reti con piano letto a maglia metallica.*

La piattaforma di sostegno del materasso dovrà essere a doghe in legno e in grado di sostenere il peso dell'utilizzatore e del materasso. Il piano di appoggio dovrà essere libero da ingombri e assicurare una adeguata ventilazione.

UTILIZZO

⚠ AVVERTENZA! *L'utilizzo da parte di persone di peso superiore ai 100 kg modifica le prestazioni antidecubito riportate nel presente testo.*

⚠ AVVERTENZA! *Evitare una postura fissa.*

⚠ AVVERTENZA! *L'utilizzo del materasso in condizioni di lesioni alla cute di 1° - 2° stadio deve essere eseguito a seguito di giudizio clinico ed eseguito sotto controllo medico.*

Per effettuare la messa in uso del materasso procedere nel modo seguente:

- estrarre il materasso dalla confezione e arieggiarlo per alcune ore;
- verificare che il piano di appoggio sia pulito, asciutto e libero da corpi estranei che possano nuocere alla integrità del materasso;
- controllare che la cerniera del rivestimento sia completamente chiusa;
- posizionare il materasso direttamente sul piano rete con il lato "A" rivolto verso l'alto.

RIMOZIONE DI MACCHIE

Per pulire eventuali macchie non usare solventi o altri materiali aggressivi, ma esclusivamente acqua tiepida asciugando bene la zona a bassa temperatura subito dopo il lavaggio.

MANUTENZIONE

Per prolungare la vita del materasso ed evitare deformazioni permanenti è necessario eseguire una rotazione testa/piedi ad ogni cambio lenzuola e far arieggiare la lastra qualche ora aprendo la cerniera. Non esporre a fonti di calore dirette o a umidità. Non lavare la lastra interna.

VITA PREVISTA

Le prestazioni antidecubito sussistono per circa 6/7 anni per un utilizzo normale. Il fabbricante non assicura queste prestazioni con un uso intensivo del materasso.

SMALTIMENTO

Il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti urbani. Per lo smaltimento rivolgersi al proprio comune, ad un'azienda specializzata o alle oasi ecologiche.

GARANZIA

I materassi Gli Artigiani Del Riposo sono coperti da garanzia Europea della durata di 24 mesi.

ID07729-0.0



Gli artigiani del riposo

C/da Scalapitta snc

- zona PIP

87073 - Oriolo (CS)

tel +39 0981 931051

info@gliartigianidelriposo.it