




gli **ARTIGIANI**
del **RIPOSO**



IPNOS

Materasso antidecubito

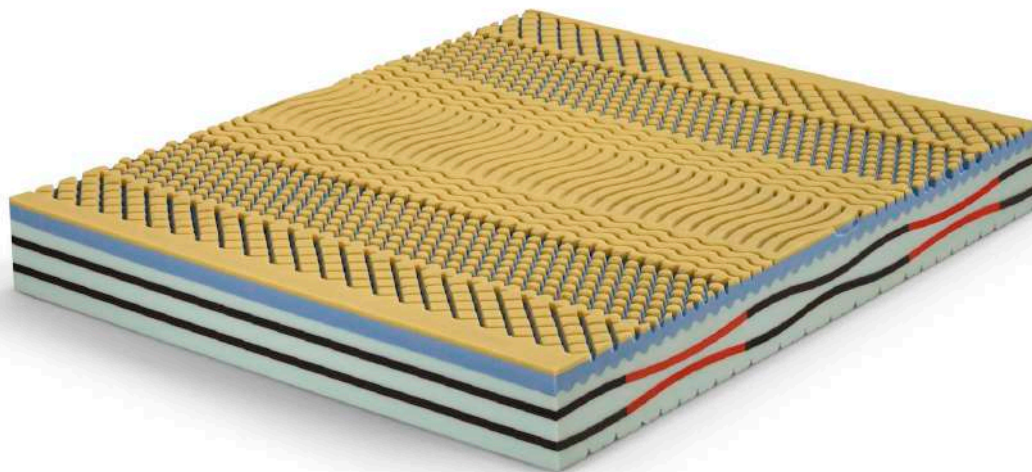

Istruzioni per l'uso e la manutenzione

Istruzioni originali

Data	Revisione	Motivo della revisione
22/08/2022	0.0	Prima Edizione

Sommario

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE.....	4
DESTINAZIONE D'USO	5
CARATTERISTICHE TECNICHE	5
DESCRIZIONE GENERALE.....	6
SIMBOLOGIA UTILIZZATA.....	7
ETICHETTA IDENTIFICATIVA	7
PIATTAFORMA DI SOSTEGNO.....	8
UTILIZZO.....	8
RIMOZIONE DI MACCHIE.....	8
MANUTENZIONE.....	8
VITA PREVISTA	9
SMALTIMENTO	9
GARANZIA.....	9

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Il fabbricante:

Gli Artigiani del Riposo srl, con sede in C/da Scalapitta snc, 87073 Oriolo (CS)

SRN: n.d.

Dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che il seguente materasso antidecubito

Nome prodotto	Codice prodotto	ID BD/RDM	UDI-DI di base
IPNOS	02828	2298575	80507138502828NL

Destinazione d'uso: il materasso è destinato ad essere utilizzato per la prevenzione statica di lesioni da decubito, e può essere impiegato in condizioni di cute integra o in presenza di lesioni di 1° - 2° stadio (per soggetti di peso inferiore o uguale a 100 kg e a seguito di un giudizio clinico).

Ambiente d'uso: uso domestico.

Il dispositivo non può essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Personale destinato all'uso del dispositivo: soggetti invalidi e affetti da condizioni gravi che obbligano alla degenza.

Classe di rischio: Classe I (conformemente alla Regola 1, Allegato VIII del Regolamento (UE) 2017/745)

È conforme ai seguenti atti legislativi dell'Unione:

2017/745/UE - Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici.

Il dispositivo è assoggettato alla procedura di valutazione di conformità prevista all'articolo 52, punto 7 del Regolamento 2017/745/UE

Oriolo, 22 agosto 2022

Amministratore unico: Vincenzo Brancaccio

DESTINAZIONE D'USO

Il materasso IPNOS è destinato ad essere utilizzato per la prevenzione statica di lesioni da decubito, e può essere impiegato in condizioni di cute integra o in presenza di lesioni di 1° - 2° stadio (per soggetti di peso inferiore o uguale a 100 kg e a seguito di un giudizio clinico).

Ambiente d'uso: uso domestico.

Il dispositivo non può essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Personale destinato all'uso del dispositivo: soggetti invalidi e affetti da condizioni gravi che obbligano alla degenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Lunghezza</i>	190 - 195 - 200 cm
<i>Larghezza</i>	80 - 85 - 90 - 120 - 140 - 160 - 165 - 170 - 180 cm
<i>Altezza della lastra interna</i>	22,5 cm
<i>Composizione struttura interna</i>	1° Strato: Memory Breeze verde 5 cm 2° Strato: poliuretano 2,5 cm 3° Strato: poliuretano 9 cm 4° Strato: WaterFoam 6 cm
<i>Lastra portante</i>	Poliuretano
<i>Rivestimento</i>	<i>Tessuto superiore:</i> 100% PES <i>Imbottitura:</i> 100% PES <i>Tessuto inferiore:</i> 100% Microfibra di Poliestere <i>Fascia perimetrale:</i> Tessuto superiore 100% PES - <i>Imbottitura</i> 100% Pes - <i>Tessuto inferiore:</i> TNT
<i>Peso massimo paziente</i>	Portata materasso: 150 kg Le prestazioni antidecubito sono garantite per utilizzatori di peso inferiore o uguale ai 100 kg

DESCRIZIONE GENERALE

Materasso memory sette strati a zone di portanza differenziata.

Strato A: Water lilly giallo spessore 2 cm con intagli profondi; crea uno strato superficiale fra il corpo ed il memory consentendo un maggiore passaggio di aria;


Strato B: Memory Foam azzurro spessore 5 cm ad alta densità e cellule aperte

Strato C: tre strati in Water Foam verde mare a cellule aperte ad alta densità con particolare lavorazione bugnata nell'ultimo strato che ne conferisce un supporto più sostenuto;







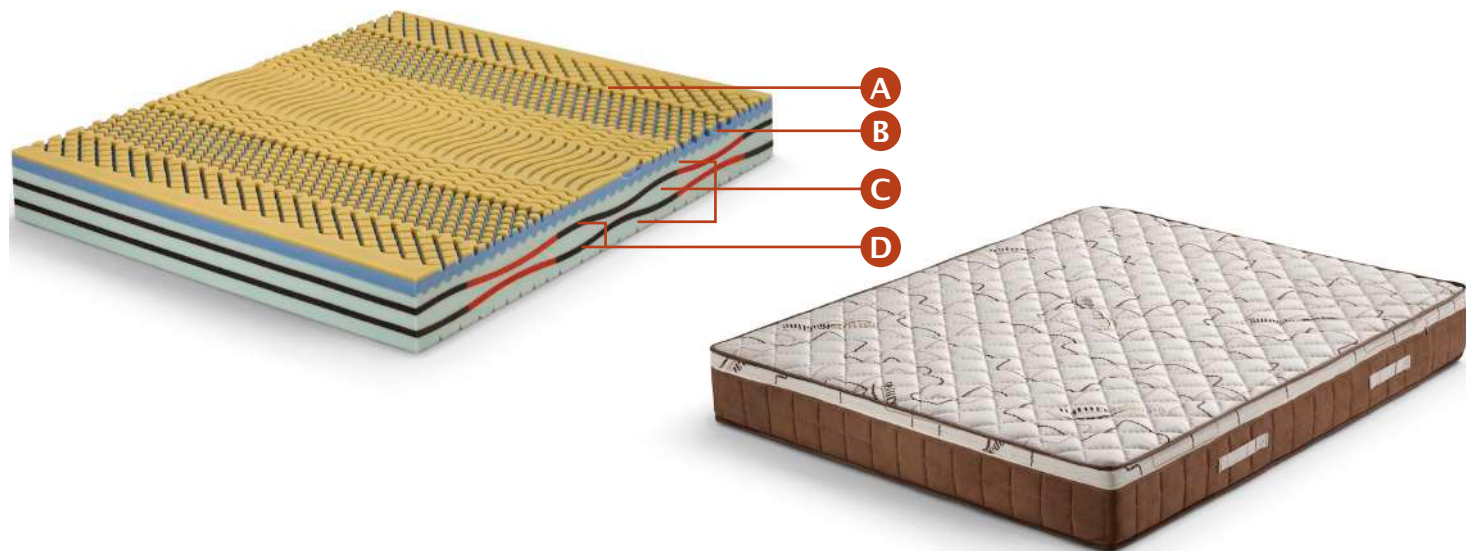







Strato D: due strati intermedi in poliuretano portante a sette zone di portanza differenziata di colore rosso e nero, favorisce la corretta postura durante il riposo.

Rivestimento in tessuto personalizzato Nature Bedding: impobbitura anallergica, fascia perimetrale in microfibra con bordatura e maniglie cucite. Rivestimento sfoderabile, lavabile a secco.

Altezza finita del materasso: 25/26 cm.



SIMBOLOGIA UTILIZZATA

 Codice catalogo	 Marcatura CE ai sensi del Regolamento 2017/745/UE	 Lavabile a secco (eccetto tetracloroetilene) (solo fodera)
 Lotto di produzione	 Massimo peso paziente	 Non centrifugare
 Fabbricante	 Vettore UDI	 Non stirare
 Data di produzione	 Numero di serie	 Non candeggiare
 Dispositivo medico	 Non asciugare in tamburo	

ETICHETTA IDENTIFICATIVA

Di seguito viene riportata l'etichetta identificativa cucita sul materasso.



**gli ARTIGIANI
del RIPOSO**



Gli Artigiani del Riposo S.r.l.
con sede in C/da Scalapitta snc, 87073 Oriolo (CS)
tel +39 0981 931051 - info@gliartigianidelriposo.it




 XXXXXXXX

 MM/20XX

 XXXXX

 XXXXXXXX

 = XXX Kg

MADE IN ITALY

MODELLO

000 x 000 cm

LAVAGGIO

Simboli di lavaggio ISO 3758

LATO A

 Vettore UDI

ID07729-0.0

gli ARTIGIANI del RIPOSO

7

PIATTAFORMA DI SOSTEGNO

! *ATTENZIONE! Non usare reti con piano letto a maglia metallica.*

La piattaforma di sostegno del materasso dovrà essere a doghe in legno e in grado di sostenere il peso dell'utilizzatore e del materasso. Il piano di appoggio dovrà essere libero da ingombri e assicurare una adeguata ventilazione.

UTILIZZO

! *AVVERTENZA! L'utilizzo da parte di persone di peso superiore ai 100 kg modifica le prestazioni antidecubito riportate nel presente testo.*

! *AVVERTENZA! Evitare una postura fissa.*

! *AVVERTENZA! L'utilizzo del materasso in condizioni di lesioni alla cute di 1° - 2° stadio deve essere eseguito a seguito di giudizio clinico ed eseguito sotto controllo medico.*

Per effettuare la messa in uso del materasso procedere nel modo seguente:

- estrarre il materasso dalla confezione e arieggiarlo per alcune ore;
- verificare che il piano di appoggio sia pulito, asciutto e libero da corpi estranei che possano nuocere alla integrità del materasso;
- controllare che la cerniera del rivestimento sia completamente chiusa;
- posizionare il materasso direttamente sul piano rete con il lato "A" rivolto verso l'alto.

RIMOZIONE DI MACCHIE

Per pulire eventuali macchie non usare solventi o altri materiali aggressivi, ma esclusivamente acqua tiepida asciugando bene la zona a bassa temperatura subito dopo il lavaggio.

MANUTENZIONE

Per prolungare la vita del materasso ed evitare deformazioni permanenti è necessario eseguire una rotazione testa/piedi ad ogni cambio lenzuola e far arieggiare la lastra qualche ora aprendo la cerniera. Non esporre a fonti di calore dirette o a umidità. Non lavare la lastra interna.

VITA PREVISTA

Le prestazioni antidecubito sussistono per circa 6/7 anni per un utilizzo normale. Il fabbricante non assicura queste prestazioni con un uso intensivo del materasso.

SMALTIMENTO

Il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti urbani. Per lo smaltimento rivolgersi al proprio comune, ad un'azienda specializzata o alle oasi ecologiche.

GARANZIA

I materassi Gli Artigiani Del Riposo sono coperti da garanzia Europea della durata di 24 mesi.

Note:



Gli artigiani del riposo

C/da Scalapitta snc

- zona PIP

87073 - Oriolo (CS)

tel +39 0981 931051

info@gliartigianidelriposo.it